

Fecha	Versión	Licencia	Detalle
03/08/1995	1.0.0	Software nuevo Pago	<ul style="list-style-type: none"> • Versión inicial
08/01/1996	1.0.1	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de búsqueda de pacientes.
22/09/2003	2.0.0	Actualización Paga (llave física)	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de llave de seguridad paralelo para funcionamiento • Múltiples estudios para un único paciente. • Los gráficos incorporan colores y símbolos normalizados para Vía Ósea y 11 frecuencias. • Vista previa en la impresión del informe. • Incorpora Impedanciometría y Timpanograma. • Conexión para audiómetros AD-150 y AD-151 y para impedanciómetro HB-207
12/04/2004	2.0.2	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se mejora el funcionamiento frente a errores del operador, poniendo mensajes describiendo el error.
21/05/2004	2.1.2	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión con audiómetro AD-160. • Mejora en la impresión del Timpanograma y notas del paciente
18/06/2004	2.1.3	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora generales de funcionamiento y seguridad.
23/07/2004	2.1.4	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se incorpora información para la actualización por Internet. • Optimizaciones en el manejo de los datos (interno).
27/08/2004	2.1.5	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoras adicionales de control de errores del operador.
15/10/2004	2.1.6	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de respaldo de base de datos y restauración. • Mejoras en el manejo y llenado de los formularios de datos. • <u>Gráficos audiométricos</u>: Selección de grilla de 1 ó 5 dB; mejoras en la indicación de nivel y frecuencia, cambio de símbolo de VO, se agrega símbolo de "No percepción", unión de símbolos VA con línea punteada, VO sin línea. • Mejoras generales en el funcionamiento.
28/01/2005	2.2.0	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Incorpora Logoaudiometría. • Mejoras en el informe impreso: posibilidad de incluir o no los datos del estudio (texto) en el informe de impresión; posibilidad de elegir las notas del paciente a imprimir y si imprime con fecha o no. • Posibilidad de trabajo en red: el SGA puede trabajar ahora con diferentes bases de datos ubicadas en red LAN o en otros directorios. • Posibilidad de guardar la base de datos o copias de respaldo con nombre y directorio a elección del operador. • Exportación de base de datos en formato "mdb". • Exportación de gráficos con formato "bmp". • Más posibilidades de personalización. • Se incorporan nuevos botones de herramientas y teclas de acceso rápido. • Se incorpora mayor información en la barra de estado. • Mejoras en el gráfico de timpanogramas. • Mejoras generales en el funcionamiento interno.

01/04/2005	2.2.1	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del cálculo de edades
19/02/2006	2.3.0	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Las barras de herramientas de los formularios Logo, Timpanograma y Audiograma son flotantes. • Los tres editores (Audiograma, Timpanograma y Logoaudiograma) pueden estar abiertos a la vez. • Se agregó la posibilidad de borrar todas las curvas o de a una en los tres editores. • La posición del cursor se muestra en la barra de botones. • Timpanograma: en la barra de estado se agregó un vúmetro de leds para indicar el balance cuando se conecta el HB-207; en modo cursor el puntero del mouse sigue a la curva; se mejoró la recepción de datos desde el HB-207 para mejorar la lectura de los valores; Se agregó un botón para el timpanograma compensado; Indica la presión del pico y su volumen, volumen del canal y del oído medio. • Se agregaron carteles de advertencia para guardar los estudios al querer abrir otro o cerrar la ventana.. • Timpanograma e Impresión: Se agregaron botones para ver o no el punto con dato y el símbolo del oído. • Hay un asistente para calibrar el SGA con el HB-207.
01/09/2006	2.4.0	Actualización Paga (llave física)	<ul style="list-style-type: none"> • Se cambio la llave de protección por otra que utiliza puerto USB. • Se cambio la extensión de la base de datos a .mdb. • Se eliminó la opción exportar del menú archivo.
01/11/2007	2.4.1	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrego compatibilidad con futuros productos.
01/04/2009	2.4.2	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrigió un problema al acceder a bases de dato de solo lectura, como las grabadas en un CD por ej. • En la impresión del timpanograma se agregaron debajo los datos importantes de la curva. • Mejoras menores varias.
13/06/2012	2.4.3	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se le agrego conectividad con AD101
24/08/2012	2.4.4	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrigió error de paginas en impresión de estudios
11/08/2016	2.4.5	Actualización Gratuita	<ul style="list-style-type: none"> • Se agregó compatibilidad con Windows 10

CONTACTESE PARA ACCEDER A LAS ACTUALIZACIONES

Teléfono/Fax: +54 221 479-9164 / 479-3858

Mail: info@ladie-audiologia.com

Facebook: [ladie.audio](https://www.facebook.com/ladie.audio)

